

IMPORTANT :

- Le **prélèvement doit absolument être réalisé et authentifié par un vétérinaire** pour être reconnu officiellement.
- Il faut faire un bon prélèvement (prélèvement de cellules buccales, pas de salive) pour que l'analyse se déroule correctement.
- Le **Tarif Club** est appliqué sur présentation d'une preuve d'appartenance à un club de race ou une association canine ou féline (**photocopie d'une carte de membre de club**).
- Pour les **chiots ou chatons non identifiés**, le vétérinaire effectuera une pré-identification. Nous vous transmettrons alors des résultats provisoires en attente d'identification définitive (il faudra alors nous renvoyer la fiche de prélèvement signé du vétérinaire attestant que le numéro de puce/tatouage correspond bien au chien prélevé).

Comment réaliser le prélèvement ?

Etape 1 :



-Inscrivez vos **coordonnées**, le **test que vous désirez** avec les **coordonnées de l'animal** et votre autorisation au transfert de données.

- Le vétérinaire inscrira ensuite ses coordonnées et **vérifiera les coordonnées de l'animal prélevé (tatouage, numéro de puce,...)**

Etape 2 :



-Introduire la brosse **entre la joue et la gencive** de l'animal.

-**Bien frotter et tourner la brosse contre la joue pendant 30 secondes environ**. Le but est de récupérer des cellules buccales qui contiennent l'ADN de l'animal (pas de prélèvement de salive).

Etape 3 :



-**Coupez** la cytobrosse **à 1 cm** de la brosse et placez la dans le tube fourni et vérifiez qu'il **y a toujours de l'éthanol** dans le tube (sans éthanol, les cellules buccales ne se conserveront pas).

-**Refermez le tube** et placez le dans le sachet plastique.

- **Collez l'étiquette** adhésive correspondante (**SAMPLE 0000-000**) sur la fiche de prélèvement. Cette étiquette permet de faire le lien entre le tube et la fiche de prélèvement.

Lorsque tous les prélèvements sont réalisés, placez dans une enveloppe à bulle :

- Le **tube de prélèvement** dans le sachet plastique,
- Le **règlement** (chèque à l'ordre de GENINDEXE ou virement bancaire)
- La **feuille de prélèvement** remplie et signée

Paiement en euros à GENINDEXE – CREDIT AGRICOLE CMDS – 17000 LA ROCHELLE – FRANCE

IBAN : International Bank Account Number

/F/R/7/6/ 1/1/7/0/ 16/1/1/0/ 13/5/5/2/ 15/8/3/7/ 19/1/0/0/ 11/5/2/

BIC swift Bank Identification Code: AGRIFRPP817

Merci de préciser votre nom ainsi que le nom des tests demandés lors du virement bancaire.

Attention : En l'absence de règlement joint aux échantillons vos analyses ne pourront être réalisées.